

# Remoção dos Attachments



**INVISIBLE  
ALIGNER**

PERFORMANCE PARA SORRIR

# — Introdução

Tão importante como saber colocar os attachments, é saber removê-los ao final do tratamento sem causar nenhum dano ao esmalte dentário. Para isso preparamos uma sequência com o passo a passo para você seguir, que deixará os dentes dos seus pacientes perfeitos, sem nenhum risco no esmalte e com sorrisos ainda mais brilhantes.

# — Remoção dos Attachments:

## Kit DHPRO Dr. Rafael de Wallau (Invisible Aligner)

- Broca Diamantada 4137F  
(remoção de resina inicial)

Broca Multilaminada 22PSFG  
(Remoção de resina)

PGU10CA  
(Remoção de resina residual)

P22U3K  
(Brilho no esmalte)



**INVISIBLE  
ALIGNER**

PERFORMANCE PARA SORRIR

# — Procedimento Clínico:

1 - Iniciamos a remoção dos attachments com a broca diamantada nº 4137F para remover a parte mais superficial da resina no dente (cuidado para não tocar o esmalte)



2- Nossa segunda broca é a multilaminada nº 22PSFG para remoção residual da resina



**INVISIBLE  
ALIGNER**

PERFORMANCE PARA SORRIR

**4-** Remoção de resina residual  
(Baixa rotação) – PGU10 CA



**5-** Brilho no esmalte  
(Baixa rotação) – P22U3K



**INVISIBLE  
ALIGNER**

PERFORMANCE PARA SORRIR

6- Ao final teremos o esmalte dentário perfeito e brilhoso!



**INVISIBLE**  
ALIGNER

PERFORMANCE PARA SORRIR